












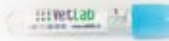












## MATERIJAL ZA UZORKOVANJE

IZGLED	OPIS	OBJAŠNENJE	OZNAKA	IZGLED	OPIS	OBJAŠNENJE	OZNAKA
	Epruveta sa LJUBIČASTIM poklopcem	Epruveta sadrži EDTA antikoagulans. Epruvetu puniti do tamne horizontalne crtice. Obavezno je po uzorkovanju promešati kako bi se antikoagulans (EDTA) sjedinio sa krvlju. Nikako mučkati!	Ljubičasti kružić 		Sterilna i nesterilna posuda za urin	U sterilnu posudu za urin uzorkovati urin za urinokulturu ili bilo koji fluid iz kojeg je potrebno izolovati mikroorganizme. U nesterilnu posudu za urin uzorkovati urin za kvalitativni pregled sa pregledom sedimenta.	Žuti trougao sterilna nesterilna  
	Epruveta sa ŽUTIM poklopcem	Na dnu epruvete nalazi se gel. Gel pomaže prilikom izdvajanja seruma u laboratoriji. Ne morate mučkati epruvetu. Gel ostaje nepromenjen na dnu epruvete i po uzorkovanju.	Žuti kružić 		Sterilni bris	Bris koristiti za sterilno uzorkovanje za mikrobiološke pretrage.	Crni trougao 
	Epruveta sa CRVENIM poklopcem	Epruvetu puniti koliko je neophodno za analizu. Ne morate je mučkati.	Crveni kružić 		Sterilni bris sa transportnim medijumom	Bris koristiti za sterilno uzorkovanje za mikrobiološke pretrage za uzorke koji će duže vreme provesti u transportu.	Crni trougao 
	Epruveta sa PLAVIM poklopcem	Epruveta sadrži Na-citrat kao antikoagulans. Epruvetu puniti do vrha. Promešati je po uzorkovanju.	Plavi kružić 		Posuda za feces/stolicu	Posuda za uzorkovanje fecesa/stolice.	Braon kružić 
	Epruveta sa SIVIM poklopcem	Epruveta u sebi sadrži Na Fluorid. Koristi se za uzorkovanje krvi koja će biti duže vreme u transportu a neophodno je utvrditi nivo glukoze i laktata.	Sivi kružić 		Mikroskopska pločica	Pločicu fizički zaštititi od oštećenja. Najbolje je koristiti VETLab-ovo pakovanje za mikroskopske pločice.	Plavi pravougaonik 
	Epruveta sa ZELENUM poklopcem	Epruveta sadrži litijum heparin kao antikoagulans.	Zeleni kružić 		Sterilna posuda za mleko	U sterilnu posudu za mleko uzorkovati mleko za utvrđivanje uzročnika mastitisa. U ovu posudu možete uzokovati bilo koji fluid iz kojeg je potrebno izolovati mikroorganizme.	Crni kružić 