

Uputstvo za uzorkovanje krvi za genetske testove

Pravilno uzorkovanje je prvi i jedan od najvažnijih koraka za dobijanje rezultata traženog testa! Strogo se pridržavajte sledećih uputstava kako bi umanjili mogućnost kontaminacije: Uzorkovanje krvi treba da izvrši veterinar! Pročitajte sledeće uputstvo pre nego što krenete sa uzorkovanjem.

PRIPREMA

1. Ako uzimate uzorke od više životinja operite ruke pre svakog uzorkovanja. Takođe, koristite novi par rukavica, svaki put.
2. Pozovite VetExpress servis odmah po uzorkovanju.

UZIMANJE UZORAKA

1. Koristite novu sterilnu iglu za svaku životinju.
2. Uzorkujte 0,5 do 1ml nekoagulisane krvi u EDTA epruvetu (ljubičasti/lila poklopac).
3. Nekoliko puta blago promešajte krv u epruveti. Nemojte tresti istu.
4. Koagulisana krv je neupotrebljiva za analizu.
5. Stavite epruvetu u kutiju za transport uzoraka, koju ste dobili od VetLab-a.
6. Popunite zahtev za analizu, za genetske testove.

VAŽNO!

- Obavezno popunite sve podatke uključujući i potpis i pečat. Nečitke i nepotpune zahteve ne možemo primiti.
7. Ako nemate transportnu kutiju, stavite epruvetu u bilo koju drugu kutiju, koja može biti zaštitita od fizičkog oštećenja prilikom transporta.
 8. Ako se uzorak ne šalje/transportuje odmah, stavite kutiju u frižider.
 9. Pozovite **VetExpress servis** ili pošaljite uzorak na našu adresu: VetLab, Savska 31, 11000 Beograd, PAK BR 111107.